

JESS-E200

Ultraschall-Zahnsteinlöser

Hochkonzentrat



BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER ZAHNSTEINLÖSER
AUF SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS
ZUM ENTFERNEN VON
ZAHNSTEINABLAGERUNGEN UND BELÄGEN
(PLAC-SCHICHTEN) AN ZAHNPROTHESEN
ZUM EINSATZ IN/BEI
ZAHNTECHNISCHEN LABORATORIEN,
ZAHNARZTPRAXEN,
ZAHNPROTHESETRAGENDEN PATIENTEN

ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD
1 TEIL PRODUKT
MIT 5 - 20 TEILEN WASSER VERDÜNNEN
EINWIRKZEIT BEI ALTEN STARKEN
SCHICHTEN BIS 1 STUNDE



Achtung

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger (648/2004EG) enthält

CITRIC ACID

UFI: M6J0-D0TV-T00U-472C

ProduktCode: E200

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste + Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.



JESS 4 CLEAN AG
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.17
Fax: +49(0)9434-20.398.28
eMail: info@jess4clean.com

Online > www.jess4clean.com