

JESS-F100

Ultraschall-Polierpastenreiniger Hochkonzentrat



BESCHREIBUNG

ZUR ENTFERNUNG VON POLIERPASTENRESTEN UND FETTHALTIGEN MATERIALIEN AN KRONEN - BRÜCKEN - PROTHESEN INSTRUMENTEN IM ULTRASCHALLBAD UND POLIERNADELBAD
ALGINATLÖSER
FÜR ALLE ABWASCHBAREN OBERFLÄCHEN GEEIGNET!

ANWENDUNG

EINSATZ IM ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD
1 TEIL PRODUKT
MIT 5 - 20 TEILEN WASSER VERDÜNNEN
WENIGE MINUTEN EINWIRKEN LASSEN
UND ABDAMPFEN
BESSER IM ULTRASCHALLBAD ODER
POLIERNADELBAD EINSETZEN

ENTFERNT UNTERFÜTTERUNGEN
MIT ZINKOXYDPASTE
VON DER PROTHESE RÜCKSTANDSLOS
BEI HÖHER EINGESTELLTER
ANWENDUNGSLÖSUNG



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger (648/2004EG) enthält

Decylalkohol, ethoxyliert

UFI: FK80-S0T6-600C-Y2SW

ProduktCode: F100

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste + Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.



JESS 4 CLEAN AG
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.17
Fax: +49(0)9434-20.398.28
eMail: info@jess4clean.com

Online > www.jess4clean.com