



# REGOsept (begrenzt viruzid)

ABDRUCKDESINFEKTION, TAUCHBADDESINFEKTION, FLÄCHENDESINFEKTION SCHNELL- UND SPRÜHDESINFEKTION, SCHEUER- UND WISCHDESINFEKTION, BIMSSTEINDESINFEKTION, FÜR DESINFEKTIONSAUTOMATEN UND ALGINATE GEEIGNET  
UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

## Arbeitshilfe-Zusammenfassung

<b>Verwendung:</b>	<b>Anwendung:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- alkoholfreie Desinfektion zur wirksamen Desinfektion von Abformungen, Alginaten, Abdrücken, Flächen, Bimsstein</li> <li>- für das Tauchbad, in einem Handsprühgerät als Sprühdesinfektion,</li> <li>- im Desinfektionsautomaten, für den Hygojet geeignet</li> <li>- Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität</li> <li>- in der gesamten Dentaltechnik anwendbar</li> </ul>	<p>Oberfläche mit anwendungsfertiger Lösung einsprühen, ca. 1 bis 5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen</p>
<b>Besonderer Hinweis:</b>	<b>Verdünnung anwendungsfertige Lösung</b>
<p><b>Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch effektive Reinigungswirkung</b></p> <p><b>Produkt ist für alle Oberflächen geeignet Keine Geruchsbelästigung durch alkoholische Dämpfe</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Produkt verdünnen</b></p> <p>Alkoholfreie Schnelldesinfektion 7,5%ige, &gt; für 1 Liter: <b>Einwirkzeit 1 Minute</b> 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser</p> <p>Alkoholfreie Flächendesinfektion 7,5%ige, &gt; für 1 Liter: <b>Einwirkzeit 1 Minute</b> 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser</p> <p>Alkoholfreie Scheuer-Wischdesinfektion 7,5%ige, &gt; für 1 Liter: <b>Einwirkzeit 1 Minute</b> 75 ml Produkt 925 ml warmes Wasser</p> <p>Alkoholfreie Abdruckdesinfektion 5%ige, &gt; für 1 Liter: <b>Einwirkzeit 5 Minuten</b> 50 ml Produkt 950 ml warmes Wasser</p> <p>Alkoholfreie Tuchbaddesinfektion 5%ige, &gt; für 1 Liter: <b>Einwirkzeit 5 Minuten</b> 50 ml Produkt 950 ml warmes Wasser</p>
<b>Achtung:</b>	<b>Arbeitssicherheit-Symbole:</b>
<p><b>GEFAHR</b> H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p>	
<b>Kennzeichnung Lieferform:</b>	<b>Kennzeichnung Anwendung:</b>
	<p><b>Kennzeichnung Anwendung:</b> Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.</p>