

Desinfektionsmittelkonzentrat **REGOsept**  
Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- **Desinfektion & gute Reinigungskraft**
- **Alkoholfrei**
- **Parfümfrei**

**Produktbeschreibung:**

**REGOsept** ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art.

**REGOsept** ist auf quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut.

Es ist parfümfrei, enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus.

**REGOsept** ist hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen. Es ist besonders geeignet für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss.

**REGOsept** hat eine gute Materialverträglichkeit und ist auch für Acrylglas geeignet.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
<b>Bakterien und Hefen</b>							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid* (incl. MRSA)	VAH/EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	7,50%**		2,50%		1,00%
<b>Behüllte Viren</b>							
begrenzt viruzid	RKI/DVV	Inkl. HBV/HIV/HCV	7,50%	2,50%	2,00%		
<b>Unbehüllte Viren</b>							
wirksam gegen SV40/Papovaviren	EN 14476	hohe Belastung		5,00%		2,00%	
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV	ohne Belastung	0,50%				
<b>Ergänzende Prüfergebnisse nach EN</b>							
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung		3,00%	1,50%		
levurozid (C.albicans)	EN 13624	hohe Belastung	3,00%	0,75%	0,50%		

\*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

**Anwendung:**

**Flächenwischdesinfektion:**

Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **REGOsept** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

**Einsatz in Vliestuchspendersystemen:**

**REGOsept** eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen.

VERTRIEB