

Verdünnungstabelle REGOsept DS 4004

Abdruckdesinfektion, Tauchbaddesinfektion, Schnell- und Sprühdesinfektion, Scheuer- und Wischdesinfektion, Flächendesinfektion, Bimssteindesinfektion, für den Desinfektionsautomaten und für Alginate geeignet

Mischungsverhältnis	0,75%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	7,50%
0,5 l	3,75 ml	5,00 ml	10,00 ml	20,00 ml	25,00 ml	37,50 ml
0,75 l	5,62 ml	7,50 ml	15,00 ml	30,00 ml	37,50 ml	56,25 ml
1 l	7,50 ml	10,00 ml	20,00 ml	40,00 ml	50,00 ml	75,00 ml
1,5 l	11,25 ml	15,00 ml	30,00 ml	60,00 ml	75,00 ml	112,50 ml
5 l	37,50 ml	50,00 ml	100,00 ml	200,00 ml	250,00 ml	375,00 ml
10 l	75,00 ml	100,00 ml	200,00 ml	400,00 ml	500,00 ml	750,00 ml
Einwirkzeit	4 Stunden	1 Stunde	15 Minuten	10 Minuten	5 Minuten	1 Minute

Abdruckdesinfektion:	4%-ige oder 5%-ige Lösung
Tauchbaddesinfektion:	4%-ige oder 5%-ige Lösung
Schnell- und Sprühdesinfektion	7,5%-ige Lösung
Flächendesinfektion:	7,5%-ige Lösung
Scheuer-Wisch-Desinfektion:	7,5%-ige Lösung

Die Oberflächen müssen nicht nass sein. Auch nach dem verdunsten des Wassers bleiben die Desinfektionswirkstoffe auf der Oberfläche haften.

Wichtig ist die Einwirkzeit zu beachten.

Nach der Einwirkzeit das Objekt kurz mit klarem Trinkwasser nachspülen, um die restlichen Wirkstoffe, sowie die abgetöteten Mikroorganismen zu entfernen.

Hinweis: Der Vorgang bedeutet, dass nach einem kurzem Tauchbad das Objekt außerhalb des Tauchbades ruhen kann.

Durch die sehr kurze Einwirkzeit von 1 Minute auch als Ersatz für eine alkoholische Schnelldesinfektion geeignet.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater von Montag bis Donnerstag
von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
sehr gerne telefonisch zur Verfügung.
>>Telefon: +49(0)9434 – 20.398.0*Telefax: +49(0)9434 – 20.398.28<<